






Скейлеры и Кюреты

Артикул	Угол		Position		Bewegung	
	Сторона 1	Сторона 2	Сторона 1	Сторона 2	Камня	Инстр.
*AD23	6°R	35°L			↑	↪
AD33	4°R	46°L			↑	↪
AP67	5°L	38°L			↑	↪
DSS1/DS1	14°L	14°L			↑	↪
DSS2/DS2	44°L	16°R			↪	↪
F10 (Камня ESS2)	52°L	22°R			↪	↪
F11 (Камня ESS2)	56°L	14°R			↪	↪
5GC6	36°L	-			↪	-
7GC8	40°L	-			↪	-
11GC12	54°L	-			↪	-
13GC14	10°L	-			↑	↪
5GD6 / 5GL6	36°L	-			↪	-
7GD8 / 7GL8	40°L	-			↪	-
11GD12 / 11GL12	66°L	-			↪	-
13GD14 / 13GL14	4°L	-			↑	↪
GE22	20°L	20°L			↑	↪
1GE2	39°L	-			↪	-
3GE4	40°L	-			↪	-
5GE6	36°L	-			↪	-
7GE8 9GE10	40°L	-			↪	-
11GE12	54°L	-			↪	-
13GE14	12°L	-			↑	↪
15GE16	64°L	-			↪	-
17GE18 (Камня ESS2)	17°R	-			↑	↪
GX1	20°L	20°L			↑	↪
GX2	40°L	-			↪	-
GX3	2°L	42°L			↑	↪
GX4 GX4S	4°L	38°L			↑	↪
H5 33 Sickel	18°L	18°L			↪	↪
Jacquette	18°L	18°L			↑	↪
H6H7	6°L	30°L			↪	↪
5HG6	34°L	-			↪	-
7HG8	36°L	-			↪	-
11HG12	55°L	-			↪	-
13HG14	4°R	-			↑	↪

Демонстрационное видео
на www.deppeler.ch

* Для заточки титановых инструментов используется камень ESS4 и 1 резиновая подкладка, такая комбинация используется и с камнем ESS2


-  ESS4 - приобретается отдельно
-  ESS2 - входит в комплект (1шт.)
-  ESS1 - входит в комплект (1шт.)
-  Резиновая подкладка - входит в комплект (2шт.)

Артикул	Угол		Позиция		Движение	
	Сторона 1	Сторона 2	Сторона 1	Сторона 2	Камня	Инстр.
HP551	20°L				↑	↪
Sickel		20°L			↪	↪
M15	8°L	33°L			↪	↪
M21 M21F	115°L	14°R			↪	-
M23 M23F M23A M23AS	2°L	40°L			↑	↪
14MC13	2°L	42°L			↑	↪
1MY2	10°R	45°L			↑	↪
3MY4	20°R	45°L			↑	↪
5PM6	32°L	-			↪	-
7PM8	34°L	-			↪	-
11PM12	66°L	-			↪	-
13PM14	4°R	-			↑	↪
PY1	15°L	15°L			↑	↪
14PY13 14SPY13S	0°	40°L			↑	↪
PY15	20°L	20°L			↪	-
PY51Z PY51ZF PY151	20°L	20°L			↑	↪
RZ111L (Камня ESS2)	115°L	14°R			↪	-
SC5	22°L	22°L			↪	↪
*TI11	56°L	24°R			↪	↪
*TI67	6°L	24°L			↑	↪
TI23A TI23AS	8°R	52°L			↑	↪
*TIS1	14°L	14°L			↑	↪
*TIS2	44°L	16°R			↪	↪
TR15	22°L	22°L			↑	↪
ZI10	60°L				↑	-
ZI11	20°L	20°L			↑	↪
ZI15 - ZI15S - ZI15SS	6°L	30°L			↪	↪

Инструкция по пользованию

1. Зафиксируйте инструмент в держателе

- Открутите винт, чтобы открыть держатель
- Отрегулируйте держатель под инструмент
- Зажмите винт для безопасности

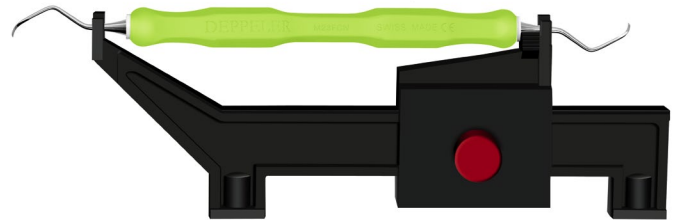


2. Проверьте номер артикула инструмента



3. Фиксирование углов

- Ослабьте винт
- Установите камень на желаемый угол
- Зажмите винт

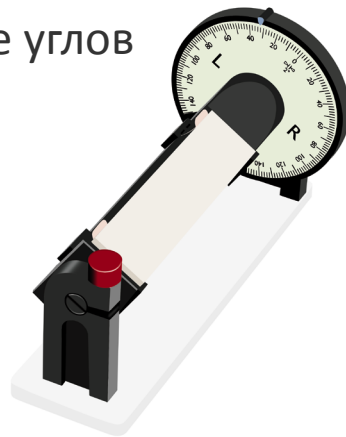

M21	M21F	115°L					
(pierre ESS2)		14°R					
M23	M23F	2°L	40°L				
M23A	M23AS	2°L	40°L				
I4MC13		2°L	42°L				

3.

3 найдите нужный угол в списке

4 проверьте движение


4. проверьте движение по списку

используя инструмент



- ↻ вращайте инструмент между пальцами
- держите инструмент неподвижно и двигайте только камень

используя камень

- ↕ двигайте камень вверх-вниз
- ↪ двигайте камень, следуя изгибу лезвия

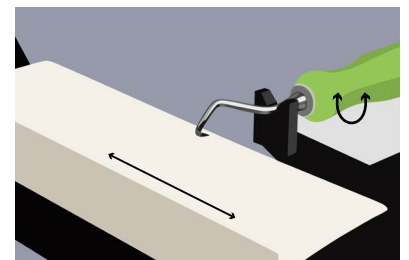

> Для инструментов не-Деппелер, вы можете сделать собственный список. Выберите угол на глаз и проверьте его путем окраски лезвия. Если краска стирается по всей поверхности во время заточки, значит угол выбран правильно. Запишите размер угла и сохраните для следующей заточки.

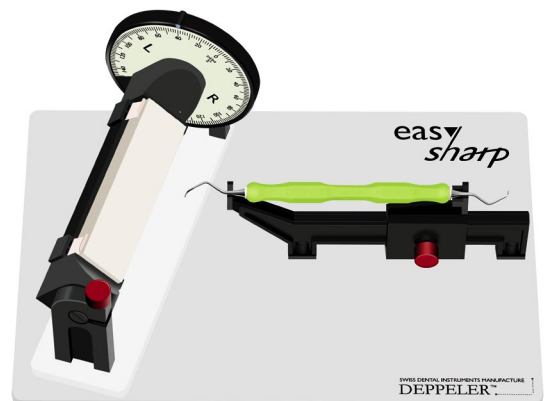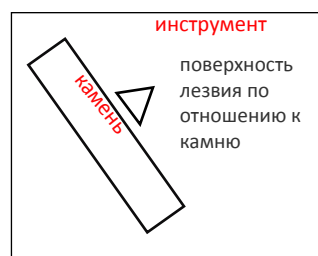

* Заточка всей линейки инструментов M23 и других инструментов с углом для заточки около 0°, следует использовать резиновую подкладку под камень, тем самым приподняв инструмент и разместив лезвие на камне.

