



DEPPELER

Signature of excellence

MÉTHODES
D'AIGUISAGE




POURQUOI CHOISIR DES INSTRUMENTS AIGUISABLES ?

Une étude a testé et comparé des instruments Deppeler et des instruments qui ne peuvent pas être réaffûtés. Les résultats montrent qu'après 1000 coups sur la dentine et cinq cycles de retraitement, tous les instruments ont perdu environ 75% de leur efficacité.

À ce stade, si le praticien utilise un instrument qui ne peut pas être aiguisé, l'instrument émoussé continuera à perdre de son efficacité.

Si le praticien utilise un instrument Deppeler, le tranchant peut être **réaiguisé pour retrouver une efficacité et un confort optimaux.**

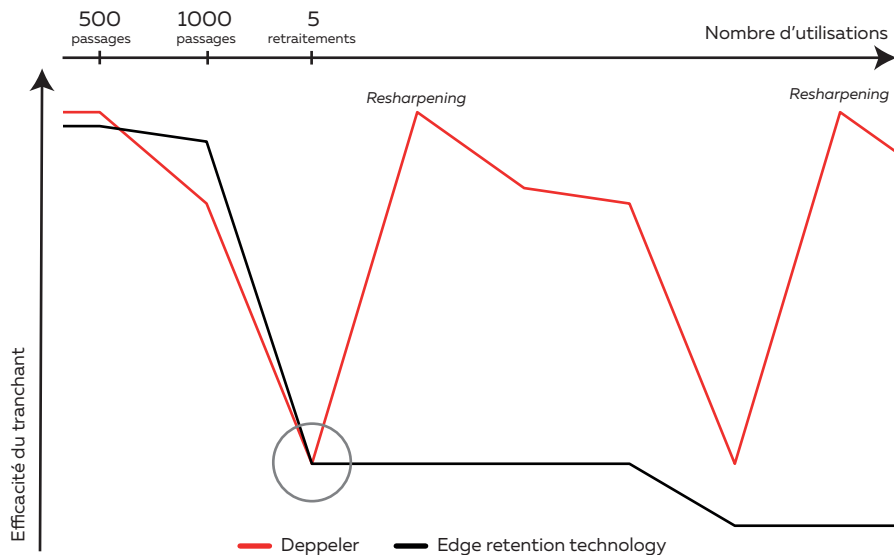

Schmidlin et. al.: In vitro evaluation of 3 curettes with edge retention technology after extended use. SSO Journal 119: 1200-1207. (12/2009)

■ Flexibilité

Les parties travaillantes des instruments aiguisables sont plus flexibles et moins susceptibles de se briser dans la bouche d'un patient.

■ Efficacité

Une pointe en acier brut est plus efficace qu'une pointe avec un revêtement.

■ Économies

Les instruments aiguisables doivent être remplacés moins fréquemment. Leur coût est moindre à long terme.

■ Durabilité

En plus de devoir acheter moins souvent des instruments, les instruments entièrement en acier sont également plus faciles à recycler.

LES MÉTHODES D'AIGUISAGE

Maintenez les tranchants de vos détartrateurs et curettes jusqu'à la fin de leur cycle de vie.

Avec les techniques Easy Sharp de Deppeler, aiguisiez vos instruments facilement et efficacement, sans facettes, ni bavures, ni dents de scie.


easy
sharp

MANUELLEMENT

Pierres naturelles



Arkansas Hard Black
ESS1
Aiguisage
standard

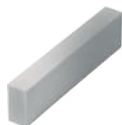

Arkansas Translucide
ESS3A
La meilleure qualité
Aiguisage plus
rapide et meilleurs
résultats



Silicone Carbide
ESS4
Pour les instruments
en titane et les
instruments en acier
très émoussés



AVEC UN GUIDE

Easy Sharp Coach

ESC

Repère visuel et contrôle facile de l'angle d'aiguisage.

1 coach pour les curettes et les détartrateurs universels, 1 coach spécifique pour les curettes Gracey.

Convient à toutes les marques.

Comment utiliser un
Easy Sharp Coach?



AVEC UN APPAREIL

Easy Sharp Device

ESD

Conçu pour une précision maximale de l'angle d'aiguisage et un contrôle optimal du mouvement.

Pour un tranchant comme neuf.

Convient aux instruments Deppeler.

Comment utiliser un
Easy Sharp Device?



Informations de commande

EASY SHARP COACH

réf. ESC

incluant :

2 coaches (1 universel and 1 Gracey)
1 pierre Arkansas Hard Black ESS1

réf. ESCPLUS

incluant :

2 coaches (1 universel and 1 Gracey)
1 pierre Arkansas translucide ESS3A

EASY SHARP DEVICE

réf. ESD

incluant :

L'appareil
1 pierre Arkansas Hard Black ESS1

réf. ESDPLUS

incluant :

L'appareil
1 pierre Arkansas translucide ESS3A

Nous vous recommandons d'aiguiser vos instruments
tous les 5 à 8 traitements.



WWW.DEPPERLER.CH

f DEPPELERSA | @ DEPPELER_INSTRUMENTS



DEPPERLER

Signature of excellence